

Professional for you

ETHANOL AUS BIO-
LOGISCHER GÄRUNG

Flächendesinfektion



Professional for you Flächendesinfektion Wipes 60 Alkoholische Tücher zur Schnelldesinfektion

- Ausgezeichnet für Zuhause und unterwegs
- Wirksam gegen Coronaviren
- Gute Material- und Hautverträglichkeit

Produktbeschreibung

Professional for you Flächendesinfektion Wipes 60 sind gebrauchsfertige und aldehydfreie Schnelldesinfektionstücher auf der Basis von Ethanol zur wirksamen und schnellen Desinfektion und Reinigung von Medizinprodukten und Oberflächen mit sehr guter Hautverträglichkeit, welche dermatologisch getestet ist. Sie sind parfümfrei und besonders geeignet für alle abwaschbaren alkoholbeständigen Oberflächen im Haushalt und unterwegs.

Anwendungsgebiete

Gemäß Biozidprodukte-Verordnung (BPR): Schnelldesinfektion und Reinigung von Flächen aller Art. Geeignet zur Verwendung im Küchenbereich.

Zweckbestimmung gem. EU-Medizinprodukteverordnung: Zur Desinfektion und Reinigung von Oberflächen nicht invasiver medizinischer Geräte mit mechanischer Einwirkung für Laienanwender.


Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten:

Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion:

bakterizid (EN 13727, EN 16615), levurozid (EN 13624, EN 16615, Candidapilze):	2 min
tuberkulozid (EN 14348) (M. terrae):	1 min
begrenzt viruzid (EN 14476, behüllte Viren wie HIV, HBV, HCV, Coronaviren):	1 min

Anwendung

Ein Tuch aus der Verpackung entnehmen und Oberflächen und Gegenstände bis zur vollständigen Benetzung abwischen und über die gesamte Einwirkzeit feucht halten. Einwirkzeiten beachten. Nicht auf alkoholempfindlichen Oberflächen (z.B. Acrylglas) anwenden. Nach der Entnahme die Packung wie-

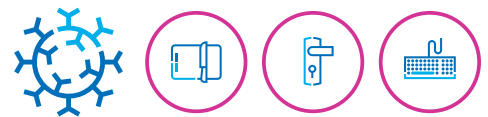

der sorgfältig verschließen. Sichtbare Verschmutzungen sind vor der Desinfektion zu entfernen. Gemäß EU-Medizinprodukteverordnung sind Anwender/Patienten verpflichtet, alle im Zusammenhang mit diesem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde des EU-Mitgliedsstaats, in dem der Anwender/Patient niedergelassen ist, zu melden.

Anwendungshinweise

Tücher nur einmal verwenden. Nicht in der Toilette entsorgen. Nicht zur Anwendung auf der Haut geeignet. Die Tränklösung enthält Bio-Alkohol. VAH-gelistet unter DESCOSPT SENSITIVE WIPES. Haltbarkeit nach Anbruch der Packung: 42 Tage.

Zusammensetzung

100 g Lösung enthalten: 45 g Ethanol.

Materialverträglichkeit

Die Anwendung wird bei folgenden Materialien nicht empfohlen: Polymethylmethacrylat (PMMA, Acrylglas), Aluminium und Messing.

Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Produkt	Gebinde	Tuchgröße	Inhalt	VE	Art. Nr.	PZN
Professional for you Flächendesinfektion Wipes 60	Packung	20 x 22 cm	60 Tücher	9	01-323DS-To60	19798360

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

BAuA Reg. Nr. N-115689

pH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 0123



Unter folgendem Link finden Sie unsere Zertifikate und Siegel:

<https://www.schumacher-online.com/de/zert>

Dr. Schumacher ist zertifiziert nach DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, BS OHSAS 18001, verfügt über ein validiertes Umweltmanagementsystem nach EMAS und ist Mitglied im IHO, VCI, BAH, DGSV und bei der DGKH.